



Dory

Seduta per l'attività



Adatto a bambini da 4 a 12 anni
Disponibile in due misure





Dory è un seduta destinata ai bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni di età che hanno bisogno di sostegni posturali durante le attività ricreative o didattiche.

È una seduta estremamente stabile e robusta, con un'imbottitura morbida e colorata, piacevole al tatto, che può essere abbinata ad un banco ampio oppure ad un tavolino, applicabile ai braccioli, per favorire le attività del bimbo: Dory è un vero e proprio sistema attivo progettato per incoraggiare il gioco o lo studio dei bambini con bisogni speciali.

Il telaio, regolabile in altezza, è rivestito da un'imbottitura soffice ma compatta che segue il corpo del bambino e assicura una confortevole posizione seduta anche per lunghi periodi; il rivestimento è estremamente resistente alle sollecitazioni di utilizzo, come graffi o strappi, o in conseguenza di ripetute sanificazioni.

Anche i braccioli sono regolabili in altezza e la sedia può essere completata da una serie di supporti di contenimento come pelotte regolabili in altezza e larghezza, fianchetti laterali per il contenimento del bacino, regolabili in larghezza o diversi modelli di cinture per il tronco e/o il bacino, che permettono il giusto posizionamento: sentendosi sicuro e correttamente sorretto il bambino sarà invogliato all'attività!



Punti di Forza

La seggiolina è stata studiata per offrire al bambino tutti gli appoggi necessari che lo fanno sentire sicuro, comodo e, di conseguenza, lo stimolano a sviluppare le sue capacità, ad essere attivo: a seconda dei bisogni del bambino la seduta può essere completata con supporti di contenimento a livello del torace o del bacino, con un poggia testa o una prolunga dello schienale che offre una superficie di appoggio maggiore.

Dory può essere completata anche con una pedana regolabile in altezza o con unità posturali per gli arti inferiori, un divaricatore e cinture di contenimento posturale che, contenendo il corpo del bambino, lo fanno sentire più sicuro nello svolgere le attività con i suoi compagni. La seduta è predisposta per l'aggancio di tutti i tipi di cinture per il supporto posturale.

Per facilitare le attività e l'utilizzo di Dory, alla seduta si può aggiungere un tavolino rimovibile, sagomato per offrire i giusti appoggi agli arti superiori, molto stabile e applicabile direttamente sui braccioli oppure un tavolo, anch'esso sagomato, con appoggio a terra, regolabile in altezza e con la possibilità di regolazione dell'inclinazione; l'aggiunta di ruotine piroettanti da interno dotate di freno agevola la movimentazione e il riposizionamento della seduta.



Ogni prodotto che esce dalla nostra azienda per noi deve avere come primo obiettivo il "far stare bene il bambino", deve cioè accoglierlo e seguirlo nelle sue evoluzioni e nei diversi bisogni; per questo motivo Dory offre diverse opportunità di regolazione e personalizzazione, con una gamma di accessori pensati ad hoc: la regolazione in altezza di seduta e banco consentono il corretto posizionamento del piano di lavoro e del piano di seduta rispetto all'appoggio a terra dei piedi, mentre la regolazione di braccioli, pedana e poggia testa permette di dare i giusti supporti rispetto alle diverse caratteristiche ed alle necessità posturali e funzionali di ciascun bambino. La possibilità di dotare Dory di differenti accessori, anche posturali, permettono a questa seggiolina, di per sé molto simile ad una normale seggiolina da scuola, di diventare un vero sistema di postura, confortevole anche per bimbi con necessità più complesse.



...ma è
così semplice!
Se tu sommi questo
trovi la soluzione!



Completa la tua Dory con...

la pedana...



le pelotte
toracali...



il
divaricatore...



i fianchetti





Dory step by step



- 1 Telaio robusto e molto stabile, regolabile in altezza, con braccioli in morbido espanso e regolabili in altezza per adeguarsi ai bisogni del bambino.
- 2 Imbottitura in espanso, morbida ma resistente, che non perde la sua elasticità anche dopo molti anni di attività.
- 3 Fodera nello speciale tessuto OM, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), particolarmente piacevole al tatto, in grado di mantenersi integro e impermeabile anche dopo grandi sollecitazioni.
- 4 Schienale e seduta sono predisposti per l'aggancio delle cinture di posizionamento e di diversi accessori che aumentano il contenimento posturale e facilitano la gestione della seduta, aiutando il bambino durante le attività.
- 5 Dory assicura grande stabilità, anche quando il bambino durante gli i trasferimenti si appoggia alla pedana!




oppure con il banco



..... Scheda dimensionale


Seduta

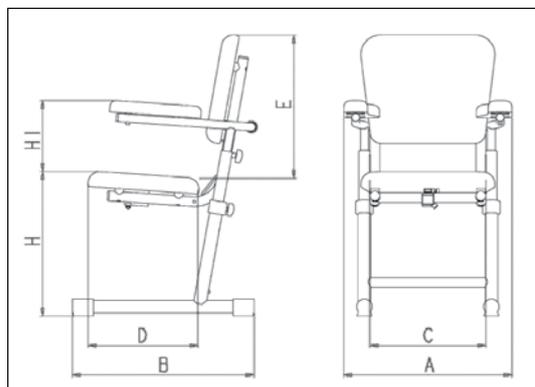

RIFERIMENTI	MIS. 1	MIS. 2
A Larghezza	44	49
B Lunghezza	46	52
C Larghezza seduta	32	36
D Profondità seduta	28	34
E Altezza schienale	38	45
H Altezza seduta/terra	36 - 52	36 - 52
H1 Altezza seduta/braccioli	12 - 21	12 - 21
Età del bambino (anni)	4 - 8	7 - 12
Altezza del bambino (cm)	104 - 126	121 - 150
Peso (Kg)	8	9,5
Portata Max (Kg)	30	45

Le misure sono espresse in centimetri


Tavolino trasparente

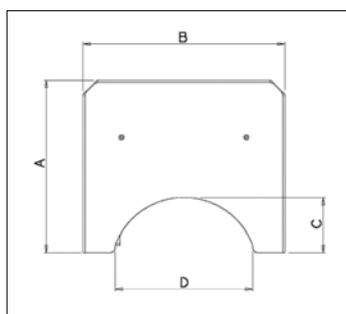

RIFERIMENTI	MIS. UNICA
A Profondità	47
B Larghezza	55
C Profondità incavo	15
D Profondità incavo	37,5

Le misure sono espresse in centimetri

Banco

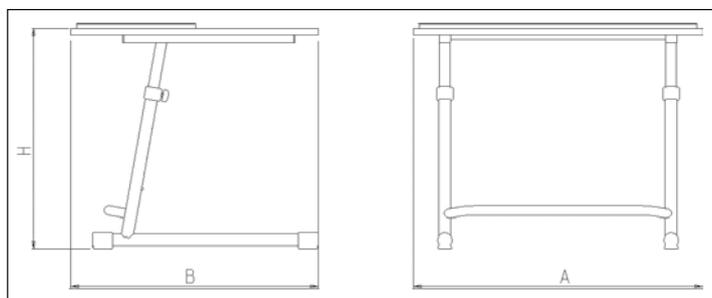

RIFERIMENTI	MIS. UNICA
A Larghezza	76,5
B Lunghezza	65,5
H Altezza seduta/terra	58,5 - 74,5
Peso (Kg)	12,5

Le misure sono espresse in centimetri

Colori disponibili per le imbottiture



Azzurro



Lilla



Verde Acido



Arancio



Accessori



Prolunga schienale/appoggiatesta, regolabile in altezza.

Due misure



Poggia testa regolabile in altezza. **Misura unica**
Unità posturale per il capo regolabile in altezza, senso antero posteriore, inclinazione, lateralmente.

Misura unica



Coppia supporti laterali per il tronco regolabili in larghezza, altezza.

Misura unica



Coppia supporti laterali per il bacino regolabili in maniera indipendente in larghezza.

Misura unica
Divaricatore imbottito regolabile in senso antero posteriore, estraibile.

Misura unica



Bretelle "Easy"

Due misure



Pettorina "Easy"

Due misure



Cintura pelvica a 45° "Easy" a due punti con pad e fibbia in plastica.

Due misure



Pedana poggia piedi regolabile in altezza e inclinazione (flesso estensione) dotata di cinturini fermapiEDE.

Misura unica



Unità posturale arto inferiore poggia piedi diviso regolabile indipendentemente in inclinabile, altezza, divaricazione, flessione pronosupinazione

Due misure



Banco con incavo, regolabile in altezza, con appoggio a terra. Disponibile anche con **regolazione in inclinazione**.

Misura unica



Tavolino trasparente con incavo, ribaltabile, inseribile sui braccioli.

Misura unica



Kit 4 ruote piroettanti diametro 40 mm con freno.

Misura unica